



So einfach ...



... ist die Anwendung unseres Fertigpens

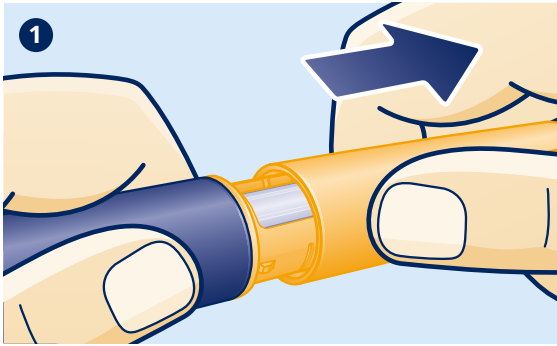

Verschlusskappe abziehen.

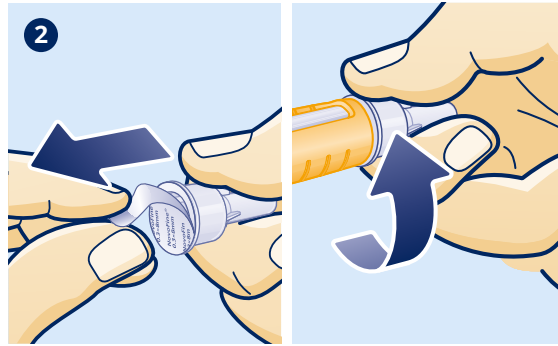


Schutzlasche von der NovoFine® Injektionsnadel entfernen. Die Injektionsnadel fest auf den Pen schrauben, dann äußere und innere Hülle der Injektionsnadel abnehmen.




Die Schritte 3 bis 5 nur bei Anbruch eines neuen Pens durchführen.

Einen „Klick“ drehen, um Luftblasen zu vermeiden und den Pen startklar zu machen.

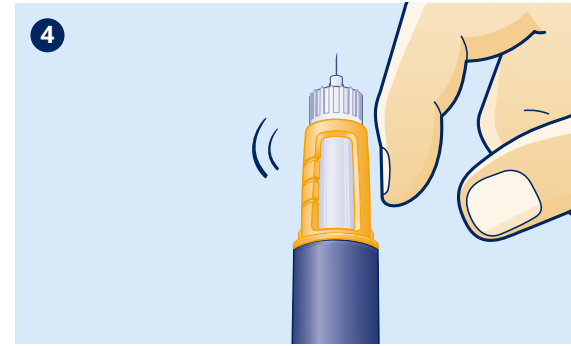


Pen senkrecht halten, einige Male mit dem Finger gegen die Patrone klopfen, um eventuell eingeschlossene Luft nach oben zu bringen.

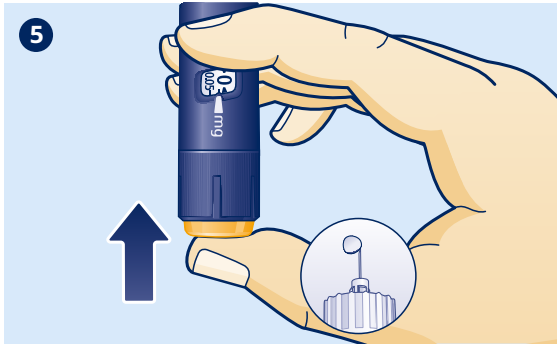

Pen weiter senkrecht halten, Druckknopf komplett eindrücken. Ein Tropfen Injektionslösung sollte an der Nadelspitze sichtbar werden, andernfalls Vorgang wiederholen (höchstens 6-mal). Wenn kein Tropfen erscheint, Nadel wechseln und erneut versuchen.


Wichtig: Verwenden Sie den Pen nicht, wenn dann immer noch kein Tropfen Injektionslösung erscheint.

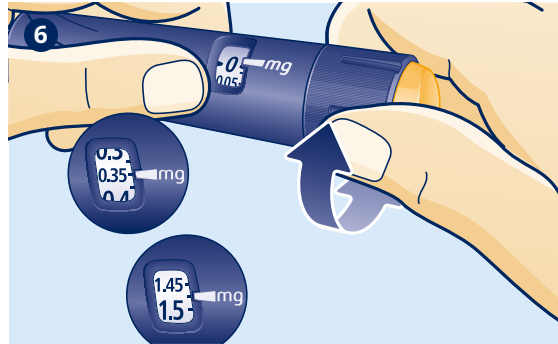

Dosisvorwahlknopf muss auf Null gestellt sein, dann gewünschte Dosis in mg einstellen.



Injektionsnadel senkrecht in die Haut einstechen, Druckknopf so lange drücken, bis die Zahl 0 in der Dosisanzeige an der Markierung steht. Während Sie dies tun, können Sie womöglich einen Klick hören oder fühlen. Injektionsnadel mindestens 6 Sekunden unter der Haut belassen.

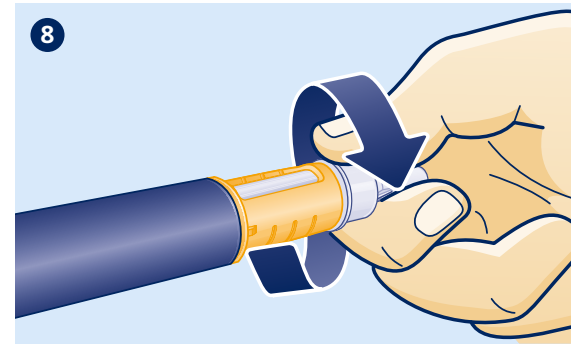

Um die Injektionsnadel abzunehmen, äußere Hülle wieder aufsetzen, Injektionsnadel vorsichtig herausdrehen und sorgfältig entsorgen. Verschlusskappe wieder aufsetzen.

Wichtig: Für jede Injektion eine neue Injektionsnadel verwenden!



Sie haben noch Fragen zum Umgang mit FlexPro®?

Dann können Sie sich hier die Injektionsvorbereitung
und die Injektion noch einmal als Video anschauen:

www.novo-wissen.de/injektion



**Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung unter
06131 903 1133**

Ein Service von

Novo Nordisk Pharma GmbH

Isaac-Fulda-Allee 24

D-55124 Mainz

www.novonordisk.de

nordicare®, NovoFine® und FlexPro®
sind eingetragene Marken der
Novo Nordisk Health Care AG, Schweiz.

